

Jednorazowe wkłady regenerująco-chłodzące Padsicles

Miękkie, elastyczne wkłady dopasowują się do ciała, maksymalizując komfort chłodzenia.

Wzbogacone o nawilżającą mieszanekę organicznego aloesu i oczaru wirginijskiego.

8 wkładów nasączonych 22,5 g nawilżającym żelem, pakowane pojedynczo ze względów higienicznych.

Testowane ginekologicznie i dermatologicznie.

Przygotowanie: Upewnić się, że żel został równomiernie rozprowadzony, kilka razy delikatnie masując całą długość wkładu. W zależności od preferencji wkłady można zamrozić lub przechowywać w lodówce. Umieścić wkład na podkładzie poporodowym w bezpośrednim kontakcie ze skórą. Zmieniać wkład tak często, jak to konieczne. Wyrzucić po zużyciu.

Stosowanie: Dokładnie umyć ręce. Delikatnie zgiąć torebkę, aby uwolnić wkład przed otwarciem. Rozerwać torebkę i ostrożnie usunąć zamrożony wkład. Przed użyciem sprawdzić temperaturę. Umieścić wkład na podkładzie poporodowym, aby miał bezpośredni kontakt ze skórą. Zmieniać wkład tak często, jak to konieczne. Wyrzucić po użyciu.

Środki ostrożności: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować u niemowląt i dzieci poniżej 12. roku życia. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie stosować na piersi, sutki, w okolicach ust i w ich pobliżu. Nie stosować na otwarte rany, w przypadku wystąpienia podrażnienia zaprzestać stosowania i zasięgnąć porady lekarza. Produkt jednorazowego użytku. Przed użyciem przechowywać na płasko w chłodnym, ciemnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Nie podgrzewać. Aby uzyskać maksymalną skuteczność, należy użyć w ciągu 3 miesięcy od zamrożenia. Nie zamrażać ponownie.

Składniki:

Woda, gliceryna, woda z oczaru wirginijskiego (oczar wirginijski), guma ksantanowa, sok z liści aloesu Barbadosensis*, kwas mlekowy, benzoesan sodu, sorbinian potasu, alkohol benzylový, chlorek didecylodimonium (*składnik organiczny)

Dystrybutor:

SensiMed Piotr Kobus ul. Jaworowa 84, 05-830 Nadarzyn

www.lansinoh.pl